


FLOCARE® NASOGASTRISK ERNÆRINGSSONDE

Enteral nasogastrisk ernæringssonde i polyuretan med mandreng. Flocare® nasogastrisk sonde er myk og behagelig, samtidig som den har nok styrke i sondeveggen til å unngå at sonden blir klemt og tilførselen blokkert. To laterale og en distal åpning sørger for optimal tilførsel av sondeernæringen. Den gjennomsiktige polyuretanen gjør det lett å kontrollere at man har skylt med vann etter bruk. Den avkortete mandrengen sørger for maksimal trygghet ved plassering av Flocare® nasogastrisk sonde.

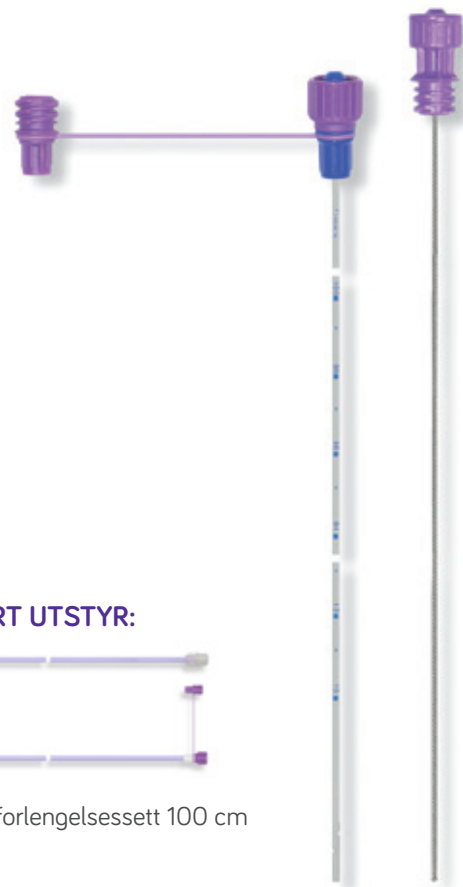

RELATERT UTSTYR:



Flocare forlengelsessett 100 cm

BESTILLING:

Sondene kan bestilles ved å sende e-post til: ordre.amnno@nutricia.com

| Produktnavn | Best.nr. | Varenr. | Antall per salgsenhet |
|--------------------------------|----------|---------|-----------------------|
| Flocare Sonde Ch5 50cm Grå | 594566 | 872102 | 10 |
| Flocare Sonde Ch6 60cm Grønn | 594567 | 824178 | 10 |
| Flocare Sonde Ch6 110cm Grønn | 594568 | 889687 | 10 |
| Flocare Sonde Ch8 110cm Blå | 594569 | 808077 | 10 |
| Flocare Sonde Ch10 110cm Svart | 594570 | 942210 | 10 |
| Flocare Sonde Ch12 110cm Hvit | 594571 | 892559 | 10 |
| Flocare Sonde Ch14 110cm Grønn | 594572 | 927326 | 10 |
| Tilbehør: | | | |
| Flocare Forlengelsessett 100cm | 591393 | 814071 | 40 |

Flocare Nasogastrisk Ernæringssonde består av:

A: Ernæringskobling (ENFit) i polyuretan

Lukkemekanismen er koblet til kobling

Ernæringskobling kan tilkobles følgende:

- Entertalt ernæringssett
- ENFit-sprøyter

Flocare nasogastriske sonder er ikke kompatible med:

- Luer-sprøyter, orale sprøyter og sprøyter med kateterspiss
- Urinpose ved ventrikkeltømming

B: Gjennomsiktig polyuretansonde

- Tre hvite røntgenfaste linjer langs hele sonden
- Avstandsmerker hver 20. cm fra distalenden

C: Distalenden har to laterale og en distal* åpning

- Fleksibel, avrundet sondespiss for skånsom nedleggelse

D: Mandreng med silikonolje

- 2,5 cm kortere enn sonden for å øke pasientens sikkerhet

*Ch 5 har lukket distalåpning

Størrelser:

Ch 5, 6, 8, 10, 12 og 14 i forskjellige lengder (se tabell over).

Indikasjon:

Ved behov for kortvarig (mindre enn 2-3 uker**) sondeernæring i ventrikkelen.

Kontraindikasjoner:

Ikke-fungerende tarm, ileus, metabolsk koma, øsofagusvaricer eller -øso-blødninger, akutt abdomen.

Holdbarhet:

60 måneder fra produksjonsdato. Holdbarhet på pakningen.

Oppbevaring:

Oppbevares ved romtemperatur.

Brukstid:

Ca. 4-6 uker. Brukstiden er vanskelig å anngi, da den kan variere avhengig av mengde magesyre, medisiner og type sondeernæring som gis.

Bytt nesebor når sonden skiftes.

**Reference: Löser, C. et al. ESPEN guidelines on artificial enteral nutrition – Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG). Clin Nutr 2005; 24: 848-861.



Brukerveiledning Flocare® Nasogastrisk Ernæringssonde:

1. Det anbefales å kontrollere plasseringen av nasogastrisk sonde minst hver 8. time ved hjelp av f.eks. en pH-papir måling, der man tilfører litt aspirert ventrikkelinhold på papiret. Ved pH ≤ 5,5 er sonden i ventrikkelen. Ved pH > 5,5 anbefales røntgenkontroll ihht. gjeldende prosedyrer av sondens plassering.
2. Det er spesielt viktig å skylle med litt vann (20-40 ml) etter aspirering av ventrikkelinhold. Hvis aspirat blir liggende i sonden, kan sondeernæringen bli denaturert av magesyre, hvilket kan føre til at sonden tilstoppes.
3. Skyll med 20-40 ml vann før og etter bruk, og minimum hver 8. time for å unngå at sonden tilstoppes.

Viktig informasjon:

Flocare ernæringssonder er designet for å administrere sondeernæring, samt aspirasjon av magevæske/ sondeernæring ved kontroll av sondens plassering. Flocare ernæringssonder skal ikke benyttes ved gastrisk dekompresjon der sug benyttes. I slike tilfeller skal ventrikkelsonder, designet for dette formålet, benyttes.