

TILBEHØR OG LØSDELER

Flocare® bordstativ

Praktisk ramme som passer til Flocare® Infinity™ pumpe og Nutricias sondeernæring eller Flocare® reservoar-beholder.




Flocare® 5 Steps Kobling

Denne 5-trinns overgangskoblingen muliggjør kobling, fra ernæringssett eller enterale sprøyter med ENFit™-kobling, til sonde/kateter med en ENLock eller Luer-fri female kobling. Kan også brukes i unntakstilfeller hvor ENFit™ til ENLock-adapteren (som sitter på overgangssettet) ikke passer godt nok. Erstatte tidligere 5-trinnskobling.



Flocare® Female Kobling

Flocare® Female kobling plasseres i mellomstykket til PEG/ Knapp som ikke har ENFit™, for å sikre kompatibilitet med foregående standard. Lekkasje-problemer kan unngås ved bruk av Female-kobling, som en erstatningsovergang, der Male-kobling ikke sitter godt nok fast.

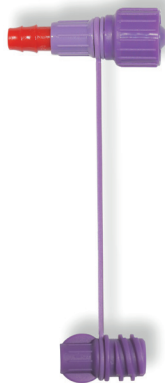

Flocare® Bolus Adapter Cross Spike

Flocare® bolus adapter har ENFit kobling, og brukes til å åpne sondeernæringsposer på en hygienisk måte, når sondeernæring skal gis med sprøyte. Bolus adapteren skal skiftes minimum hver 24. time. Sondeernæring med tilkoblet bolus adapter bør oppbevares i kjøleskap i maksimum 24 timer.



Flocare® 1,3 liter Reservoarbeholder - Cross Spike

Flocare® 1,3 liter reservoar-
beholder er egnet til
administrering av vann eller annen
type væske samt sondeløsninger.
Flocare® Reservoarbeholder
sammen med pumpesett, er et
åpent system. Hvert reservoar
er pakket sterilt og enkeltvis.
Engangsbruk.



Flocare® 500 ml Reservoar- beholder - Pack Konnektor

Flocare® 500 ml reservoarbeholder
er egnet til administrering av
vann eller annen type væske
samt sondeløsninger. Flocare
Reservoarbeholder sammen med
pumpesett, er et åpent system.
Hvert reservoar er pakket sterilt og
enkeltvis. Engangsbruk.



ENFit™ Sprøyte Støvhette

ENFit™ Sprøyte Støvhette, skrues på
ernæringsprøyter. Dette muliggjør
oppbevaring av medisin eller
annen væske i sprøyten.
For eksempel ved tilførsel av
medisin opptil flere ganger
per dag. Engangsbruk. Sprøyte
Støvhetten skal skiftes minimum
hver 24. time. Sprøyter med
innhold skal oppbevares i
kjøleskap, og ikke lenger enn 24
timer.



ENFit™ Sprøyte Strå 150 mm

ENFit™ Sprøyte Strå 150 mm, brukes
ved aspirering, opptrekk, og/eller
tilførsel av medisiner eller annen
væske via sprøyte. Skrues på
sprøyten, for å forlenge kateter-
spissen til sprøyten. Engangsbruk.



Flocare forlengelsessett 100cm

Flocare forlengelsessett 100cm,
brukes til forlengelse av en
nasogastrisk sonde, eller et
ernæringssett.
Skal skiftes minimum hver 24. time.



BESTILLINGSINFORMASJON

Tilbehør og løsdeler kan bestilles ved å sende e-post til:
nutricia.amnno@danone.com

Produktnavn	Bestillingsnr.	Varenr.	Antall per salgsenhet
Flocare® bordstativ	40361	812322	1
Flocare® forlengelsessett 100 cm	91393	814071	40
Flocare® Female Konnektor	91396	809372	10
Flocare® Bolus Adapter Cross Spike	89740	854172	30
Flocare® 1,3 liter Reservoarbeholder - Cross Spike	70139	870847	10
Flocare® 500 ml Reservoarbeholder - Pack Konnektor	40441	936429	10
Flocare® 5 Steps Konnektor	89828	890114	30
ENFit™ Sprøyte Strå 150 mm	119489	849514	30
ENFit™ Sprøyte Støvhette	119488	963816	30

Mer information om våre Flocare Infinity pumpesett og tilbehør
finnes på www.nutricia.no eller kontakt en lokal Nutricia representant.

Nutricias produkter er registrerte næringsmidler til spesielle medisinske formål og skal brukes i samråd med helsepersonell.