

FLO CARE® INFINITY™ III pumpe

Enteral ernæringspumpe til mobilt eller stasjonært bruk.

Flocare® Infinity™ III er Nutricias nyeste enterale ernæringspumpe. Ernæringspumpen er nøyaktig og sikker, og den har et enkelt og brukervennlig design.



Lett å bruke

Flocare® Infinity™ III har et intuitivt brukergrensesnitt med ergonomisk utformede knapper og velkjente symboler. Den har en stor og lett leselig fargeskjerm med relevant informasjon for å gjøre det enklere for helsepersonell og pasienter. Pumpen har 18 ulike språk, inkludert norsk. Den har 30 dagers behandlingshistorikk.

Sikkerhet

Flocare® Infinity™ III ernæringspumpe er utstyrt med automatisk anti free-flow, og har både auditive og visuelle alarmfunksjoner som sikrer trygg bruk. Informasjonsknappen på pumpen gir forslag på hvordan en alarmsituasjon kan løses. Sammen med hver pumpe medfølger en flerspråklig bruksanvisning (inkludert norsk). Pumpens lilla farge, sammen med tilhørende lilla pumpesett og lilla skrukork på emballasjen til Nutricias sondeløsninger, bidrar til å skille enteralt utstyr fra parenteralt. Flocare® Infinity™ III ernæringspumpe skal kun brukes sammen med Flocare® Infinity™ pumpesett.

Indikasjon

For administrasjon av sondeernæring.

En enteral ernæringspumpe skal alltid brukes ved administrering av sondeernæring direkte inn i tynntarmen, ved korttarmsyndrom og ved risiko for aspirasjon.

Ved diaré, kvalme/oppkast og nedsatt magekapasitet kan det være fordelaktig å anvende ernæringspumpe ved administrasjon av sondeernæring.

Enteral ernæringspumpe anbefales også ved oppstart av enteral ernæring, ved tilføring av sondeernæring om natten og ved overgang til sondeernæring med høy energitetthet.

Forholdsregler

Flocare® Infinity™ III pumpen skal kun brukes til administrasjon av enteral ernæring. Flocare® Infinity™ III ernæringspumpe skal kun brukes sammen med Flocare® Infinity™ III pumpesett.

Tekniske data

- Infusjonshastighet: 1-600 ml/time i 1 ml intervaller
- Administreringsvolum: 1–3500 ml i 1 ml intervaller
- Ernæringsbehandlinger: volum/hastighet, hastighet, intervall
- Automatisk anti free-flow funksjon
- Automatisk fylling av ernæringssett
- Historikk: 30 dager med detaljer dag for dag
- Litium-ionbatteri: 24-timers batterikapasitet* (ved 125 ml/ time)
- IP25: kan rengjøres under rennende vann
- Stort LCD display med selvforklarende informasjon
- Lyd- og lysalarmer med justerbart volum og styrke
- Størrelse: 149 x 119 x 49 mm, vekt: 434 g
- Nøyaktighet +/- 5 %
- **Skal kun brukes sammen med Flocare® Infinity™ III Pumpesett**

* Gjelder batterier som ikke er eldre enn 2 år.

BESTILLINGSINFORMASJON

Flocare® Infinity™ III ernæringspumpe kan bestilles ved å sende e-post til: ordre.amnno@danone.com

Produktnavn	Bestillingsnr.	Varenr.	Salgsenhet
Flocare® Infinity™ III Pumpe	121825	967797	1 stk.
Relaterte produkter			
Flocare®-sekk for voksne	44497	981828	1 stk.
Flocare®-sekk for barn	44496	884877	1 stk.
Flocare®-ramme til sekk	43247	830156	1 stk.



Viktig tilleggsinformasjon ved bruk av pulverblandede sondeernæringsløsninger:

Sikre at blandingen er fullstendig oppløst og homogen før og under administrering av ernæringen. Dette er for å unngå eventuell opphopning av uoppløste partikler som kan hemme pumpens yteevne.

All pulverernæring og all annen flytende ernæring, må være egnet for enteral sondeernæring ved bruk av Flocare® Infinity™ III Pumpe.

Ovenstående gjør seg især gjeldende hos pasienter hvor forstyrrelser eller forsinkelser i ernæringstilførselen kan påvirke deres helsetilstand.

Her anbefales dessuten følgende:

- Å anvende og programmere "VOLUM", hvor "BEHANDLING FULLFØRT" vil fremgå på displayet og alarmen vil gå når dosen er gitt.
NB: Slå ikke av lyden på alarmen i disse tilfellene. "LUFT I PUMPESETT" alarm skal ikke anvendes til indikasjon for at dosen er gitt ferdig.
- Sikre at mengden ernæring i beholderen er større enn den dosen som er innstilt til å gis. Dette er for å unngå evt. luftbobler i ernæringssettet under og etter administreringen.

Mer informasjon om våre Flocare Infinity pumpesett og tilbehør finnes på www.nutricia.no eller kontakt en lokal Nutricia representant.

Nutricias produkter er registrerte næringsmidler til spesielle medisinske formål og skal brukes i samråd med helsepersonell.

Nutricia, % Danone AS | Tlf. +47 23 00 21 00 | E-post nutricia.amnno@danone.com | www.nutricia.no