



FLOCARE® INFINITY™ III ERNÆRINGSPUMPE

1. Koble Flocare® Infinity™ pumpesett til sondeernæringen. Skru fast.
2. Dersom pumpesett med dråpekammer benyttes, klem til det er fylt ca. halvfullt.
- 3.



Åpne pumpelokket ved å trykke kanten på lokket forsiktig bakover






Plasser løkken på pumpesettet rundt rotoren



Trekk forsiktig i slangene til kassetten er på plass i sporet på pumpen




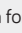

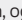
Lukk pumpelokket

4. Slå på pumpen ved å holde inne AV/PÅ-knappen  i 2 sek. til du hører et signal. Pumpen utfører nå en selvtest.
5. Fyll Flocare® pumpesett ved å holde inne  i 2 sek. Når pumpesettet er nesten fylt, kan du stoppe ved å trykke  igjen, eller vente til den stopper automatisk.
6. Pumpen kan stilles til tre ulike programmer: volum/hastighet, hastighet og intervall. For mer informasjon om intervallbehandling se brukermanual.

Viktig: Hvis en ønsket ernæringsbehandling ikke vises når du trykker på BEHANDLING-knappen , kan du aktivere den ved å velge: INNSTILLINGER → DEFINER BEHANDLINGER


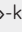
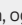
Volum/Hastighet:

Her settes mengden samt hastigheten man ønsker at behandlingen skal ha.

- Trykk på BEHANDLING-knappen  på startskjermen.
- Velg Volum/Hastighet ved å trykke på den tilhørende funksjonsknappen på siden av skjermen.
- Trykk på funksjonsknappen ved «Volum», velg volumet med knappene «+» og «-», og trykk på -knappen for å bekrefte.
- Trykk på funksjonsknappen ved «Hastighet», velg hastighet med knappene «+» og «-», og trykk på -knappen for å bekrefte.
- Koble Flocare® ernæringssettet til sonden, og trykk START-knappen  for å starte behandlingen.

Hastighet:

Her settes kun hastighet for å gi en kontinuerlig behandling.






- Trykk på BEHANDLING-knappen  på startskjermen.
- Velg Hastighet ved å trykke på den tilhørende funksjonsknappen.
- Trykk på funksjonsknappen ved «Hastighet», velg hastighet med knappene «+» og «-», og trykk på -knappen for å bekrefte.
- Koble Flocare® ernæringssettet til sonden, og trykk START-knappen  for å starte behandlingen.

Intervall:

For informasjon om intervallbehandling se brukermanual.

7. Når behandlingen er fullført, vil «Infinity-symbolet» bli orange, og en alarm varsler «Behandling fullført».
8. Slå av pumpen ved å holde inne AV/PÅ-knappen  i 2 sek.

OVERSIKT OVER PROBLEMLØSNINGER

Dersom du gjenkjenner alarmen, trykk «Hjem-knappen»  for å stanse alarmen og løse problemet. Dersom du ikke gjenkjenner alarmen, trykk på «Slumre-knappen»  for å dempe alarmen i 2 minutter. Trykk deretter på «Informasjons-knappen»  for informasjon rundt problemet og hvordan du skal løse det. Trykk på «Hjem-knappen»  for å nullstille alarmmeldingen. Ernæringsbehandlingen kan startes på nytt ved å trykke på START/PAUSE-knappen  når årsaken til alarmen er løst.

ALARMVARSEL	ÅRSAK	LØSNING
Behandling fullført	Pumpen har fullført tilførselen av den programmerte ernæringsbehandlingen.	Trykk på HJEM-knappen  for å nullstille alarmmeldingen. Slå av pumpen hvis ernæringsbehandlingen er ferdig.
Bytt pumpesett	Pumpesettet har vært i bruk mer enn 24 timer.	Bytt ut Flocare® Infinity™ pumpesett med et nytt Flocare® Infinity™ pumpesett.
Dør åpen	Pumpelokket er ikke ordentlig lukket.	Lukk pumpelokket.
Lader vennligst vent	Batteriet lades.	Vent til batteriet er ladet. Dette kan ta noen minutter. Pumpen kan ikke brukes før alarmen er borte.
Lavt batterinivå	Batterinivået er lavt.	Koble pumpen til strømadapteren og et strømtutt for å lade batteriet i minimum 6 timer. Pumpen kan brukes under lading.
Luft i pumpesett	Pumpen har oppdaget luft i pumpesettet.	Hvis ernæringsbeholderen er tom: Koble fra og kast ernæringsbeholderen og Flocare® Infinity™ pumpesettet, eller bytt i henhold til opplæringen. Hvis ernæringsbeholderen IKKE er tom: Koble fra ernæringssonden, og bruk Fyll SETT-funksjonen  for å fjerne luft. Sjekk at det ikke er skum i ernæringsbeholderen. Koble til ernæringssonden på nytt, og gjenoppta ernæringsbehandlingen.
	Luftsensormrådet er skittent.	Kontroller at luftsensoren er ren. Rengjør sensormrådet ved behov.
Okklusjon inn	Pumpen har oppdaget en tilstopping mellom pumpen og ernæringsbeholderen.	Se etter bøyninger eller andre tilstoppinger mellom pumpen og beholderen, og rett dem hvis du finner noe. Start pumpen på nytt.
	Sensormrådet er skittent	Rengjør sensormrådet, sett i Flocare® Infinity™ pumpesettet, og start pumpen på nytt.
	Gjentakende alarm.	Hvis alarmen fortsetter, bytter du Flocare® Infinity™ pumpesettet.
Okklusjon ut	Pumpen har oppdaget en tilstopping mellom pumpen og pasienten.	Se etter bøyninger eller andre tilstoppinger mellom pumpen og ernæringssonden, og rett dem hvis du finner noe. Se etter bøyninger eller andre tilstoppinger på ernæringssonden i henhold til opplæringen din, og rett dem hvis du finner noe.
	Sensormrådet er skittent.	Rengjør sensormrådet, sett i Flocare® Infinity™ pumpesettet, og start pumpen på nytt.
	Gjentakende alarm.	Hvis alarmen fortsetter, bytter du Flocare® Infinity™ pumpesettet.
Pumpen avventer	Pumpen har vært urørt i 3 minutter eller mer. Ingen infusjon pågår.	Trykk på en knapp for å bekrefte alarmmeldingen.
Sett > 24 t	Påminnelse om at pumpesettet har vært brukt i mer enn 24 timer og må byttes.	Bytt Flocare® Infinity™ pumpesett med et nytt Flocare® Infinity™ pumpesett.
Sett inn pumpesett	Pumpesettet er ikke riktig installert.	Sett inn et Flocare® Infinity™ pumpesett.
Systemfeil	Det har oppstått en intern systemfeil i pumpen.	Slå av pumpen, kontroller at pumpelokket er lukket, og slå pumpen på igjen. Hvis feilen vedvarer, kontakter du utleverer/Nordic Service Group for utskifting.
Tastelås PÅ	Tastaturet er låst for å forhindre utilsiktede tastetrykk.	Lås opp tastaturet ved å trykke på I-knappen  og FUNK. KNAPP 3 samtidig.
Tomt batteri	Batterinivået er kritisk lavt.	Koble pumpen til strømadapteren og et strømtutt med én gang, og lad batteriet i 6 timer. Pumpen kan brukes under lading.
Volym levert	Ernæringsbehandlingen har nådd det programmerte målvolumet.	Trykk på HJEM-knappen  for å nullstille alarmmeldingen. Slå av pumpen hvis ernæringsbehandlingen er ferdig.

For mer informasjon rundt Flocare Infinity III ernæringspumpe se medfølgende brukermanual.

Nutricia Norge A/S | Drammensveien 123 | 0277 Oslo | Tlf. 23 00 21 00