

FLOCARE® INFINITY™ RYGGSEKK & RAMME TIL SEKK

Ryggsekk for mobilt bruk av sondeernæring.

Brukes sammen med Nutricias sondeløsninger eller reservoar-beholdere, Flocare® ramme til sekk, Flocare® Infinity™ sett for ambulant bruk og Flocare® Infinity™ pumpe.



FLOCARE® INFINITY™ TWIN-LINE PUMPESETT BESTÅR AV:

- Praktiske justerbare stropper av nylon
- Høyde: 33 cm
- Front i nylon. Utstyrt med to ytterlommer
- Ergonomisk utformet ryggside, for god komfort
- Justerbar bryststropp og hoftebelte
- Nylonstropp med trykklås for sikring av sondeernæring
- Passer både container/reservoarbeholder, og sondematpakning 500/100 ml
- Spesiellrom i stativet for feste av Flocare Infinity™ ernæringspumpe
- Lett tilgjengelig åpning på siden til ernæringssettet
- Vekt: 1820 g (inkludert Flocare Infinity™ ernæringspumpe + stativ + 500 ml pack)

Brukerveiledning

1. Trekk opp glidelåsen til lommen på forsiden
2. A) Plasser pumpen og sondeernæringen i det medfølgende stativet. Lukkes med stropp og glidelås.
B) Plasser stativet med pumpe og sondeernæringen inne i ryggsekken
3. ???
4. Alternativer for plassering av ernæringssett:
A) Plasser ernæringssettet i lommen på skulderstroppen.
B) Åpne glidelåsen på forsiden og legg ernæringssettet inn i ryggsekken.
C) For ut ernæringssettet gjennom åpningen på siden og koble til sonde eller gastronomikateter/ knapp.
D) Åpne det lille dekselet på fremsiden for å starte pumpen
5. Ved rengjøring åpne glidelåsen på ryggsekken og ta innholdet før du rengjør ryggsekken eller stativet med pumpen
6. Ryggsekken kan henges opp ved hjelp av skulderstroppene på rullestol, barnevogn eller sengekarm.


Vedlikehold

Flocare® Infinity™ Ryggsekk er laget av nylon. Bruk derfor varmt vann ved rengjøring, og ikke kjemikalier.

VIKTIG!

Når pumpen er i gang, skal Flocare® Infinity™ Ryggsekk holdes i oppreist posisjon. Sondeernæringsflasken vil da henge opp ned og gi en jevn tilførsel av sondeernæring.

mangler bilde i god kvalitet

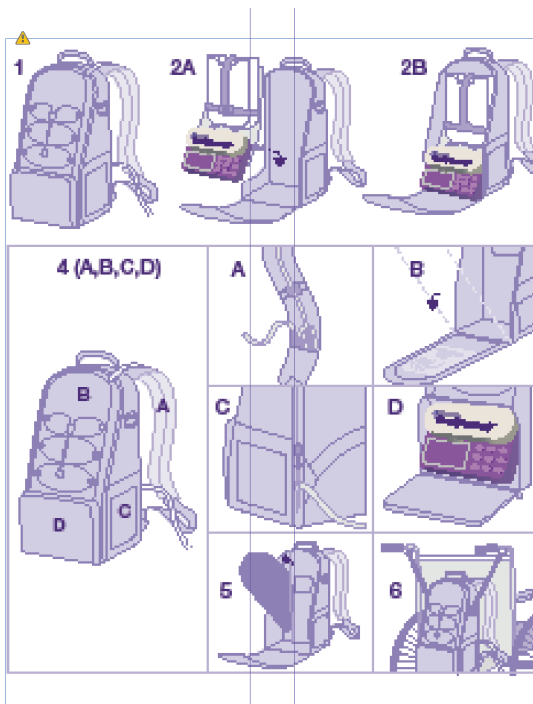

BESTILLINGSINFORMASJON

Produktnavn	Bestillingsnr.	Varenr.	Salgsenhet
Flocare® Ryggsekk for voksne	35785	981828	1 stk.
Flocare® Ryggsekk for barn	44496	884877	1 stk.
Flocare® Ramme/stativ til sekk	43247	830156	1 stk.

Mer informasjon om våre Flocare Infinity pumpe sett og tilbehør finnes på www.nutricia.no eller kontakt en lokal Nutricia representant.

Nutricias produkter er registrerte næringsmidler til spesielle medisinske formål og skal brukes i samråd med helsepersonell.